



# Bausch

**Medios para registros de  
articulación y oclusión**



**Incluso en superficies húmedas.  
Fácil de utilizar.  
Ahorro de tiempo.  
Precisión**



**Número 1 en ventas  
mundial!**

**MADE  
IN  
GERMANY**


*...we make Occlusion visible®*

# PAPELES PROGRESIVOS



Los fundadores de la empresa, el Dr Jean Bausch y el Dr Hans Bausch, eran dentistas y se dieron cuenta de la necesidad de desarrollar un papel de articular sensible a la presión para poder visualizar diferentes fuerzas

masticatorias según el grado de coloración. Este es el llamado principio de la coloración progresiva de nuestros papeles BK 01 y BK 57 donde si la presión masticatoria es leve, dejará una marca de color claro (contacto normal) y si la presión masticatoria es fuerte, dejará una marca de color oscuro (contacto prematuro).

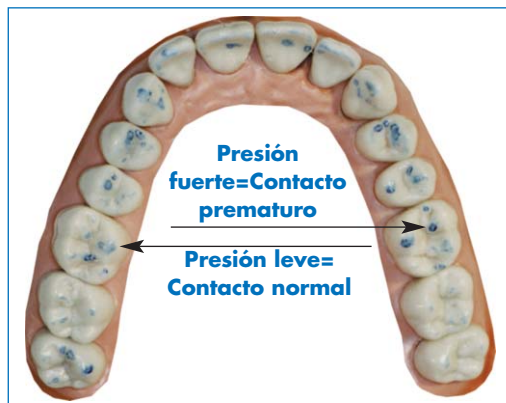

El contacto prematuro es sólo el centro sin color. La razón es que por la presión, la tinta se expande hacia los lados



## Referencias:

Caja de plástico con 300 tiras color azul 200 micras  
Cajita de plástico con 50 tiras color azul 100 micras

**BK 01** PROGRESIVO  
**BK 57** PROGRESIVO

# PAPELES FINOS (40 MICRAS)



40 micras: Especialmente indicados para **prótesis removable**. Apropriados para la visualización de la **oclusión estática y dinámica** en dos colores (azul y rojo).



*Referencias:*

Cajita de plástico con	200 tiras pre-cortadas	color azul/rojo	<b>BK 63</b>
Caja de cuadernillos rectos	200 hojas	color azul/rojo	<b>BK 80</b>

# FOLIO EXTRA-FINO (12 MICRAS)



Control de férulas rígidas. Ideal para ajuste de contactos proximales.

*Referencia:*

Rollo de 20 metros de largo  
22 mm de ancho en dispensador de plástico, color negro/rojo  
reforzada en su interior por una lámina de poliéster metalizada

**BK 28**

# Para un mejor resultado en superficies húmedas o muy pulidas recomendamos "el dúo perfecto"




## 1. Papel Progresivo



En un primer paso el BK 01 o el BK 57 secan y preparan la superficie con un adhesivo invisible (Transculase) que se pega en el contacto prematuro.



## 2. Papel extra-fino

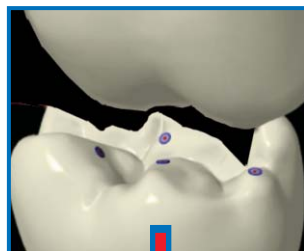

En el segundo paso el color rojo del papel extra-fino BK 28 se pegará en el adhesivo haciendo visible ese verdadero punto de contacto prematuro.

